

HÖRSELTEST PÅ HUND

Med Keypoint Portable

För hörseltest på hund, Brainstem Auditory Evoked Response, används EMG maskinen Keypoint® Portable. Hunden får lugnande läkemedel, ett par öronproppar sätts in som är anslutna till en ljudstimulator och EMG nålar ansluts på hundens huvud.

När undersökningen pågår sänds ett antal klickljud (ca 400 st) i öronpropparna samtidigt som den elektriska aktiviteten från hörselnerven spelas in och sparas i systemets dator.

Resultatet på testet kan tolkas direkt efter undersökningen av en veterinär. Alla undersökningar kan sparas i datorn och/eller skrivas ut.

Ett komplett system för hörseltest omfattar en EMG maskin, dator, EMG nålar med kablage, ljudstimulator och vagn.

Exempel på Keypoint Portable användare som utför BEAR:

- Djursjukhuset Albano, Stockholm
- Djursjukhuset Blå Stjärnan, Göteborg
- Regiondjursjukhuset Strömsholm
- Regiondjursjukhuset Helsingborg
- Kalmar Djursjukhus
- Djursjukhuset Evidensia, Göteborg
- Djursjukhuset Gammelstad, Umeå

